

ZOOが感染防止に役立つ理由

その1

ZOOを使えばアシスタントや歯科衛生士がバキュームを持つ必要がなくなるのでスタッフの感染リスクを大幅に減少することができます。

その2

ZOOを使えばコロナウイルスを含む口腔内に溜まっている唾液を口腔内から可及的に吸引除去出来ます。また治療中に出てくる唾液も出ると同時に吸引できるので治療中のウイルスを含んだ口腔内唾液量を少なくすることが可能となり、感染リスクが減少します。

その3

ZOOを使えばコットンロールの使用が激減するので、治療後のウイルスを含んだコットンロールの処理が減り、感染リスクを軽減することができます。ZOOは全体をオートクレーブ滅菌可能なので安心です。

その4

ZOOを使えば治療途中のうがいの回数が激減するのでうがい時にウイルスを含む唾液の飛び散りを減らすことができます。その他口腔内で唾液等を可及的に吸引しておけば口腔外バキュームの効果も高くなり感染予防に役立ちます。治療時間を短縮できるのも大きなメリットです。

チューブの交換は3分で完了！(6ヵ月で交換してください)

1 交換前



差し込んでいるバネとコネクタをひっぱり外します。

2 交換



コネクタに交換用チューブを差し込みバネをチューブの中に入れます。

3 交換後



チューブは定期的に交換してください。見違えるほど美しくなります。

※ZOOの滅菌について:ZOOは全てオートクレーブ可能な材料で作られています。オートクレーブで滅菌してください。

ZOO交換用チューブセット

ZOOミニα/C-ZOOミニα用 (T-02α) 2組入

※チューブセットはアルミワイヤー付きです



7,000円(税抜)

ZOOミニ用 (T-020) 4組入

※チューブセットはアルミワイヤー付きです



7,000円(税抜)

認証番号:21100BZZ00012000 特許:第2766830号・第4585246号 アメリカ特許:第7261560号 製造販売元:(株)シオダ


APT 商品センター

〒194-0204
東京都町田市小山田桜台2-5-19-103
クラハシ医療システム内

TEL:042-860-0461

FAX:042-860-0462

www.apr-inc.jp/ZOO/「歯科 ZOO」で検索してください!
APTホームページで動画をご覧ください。

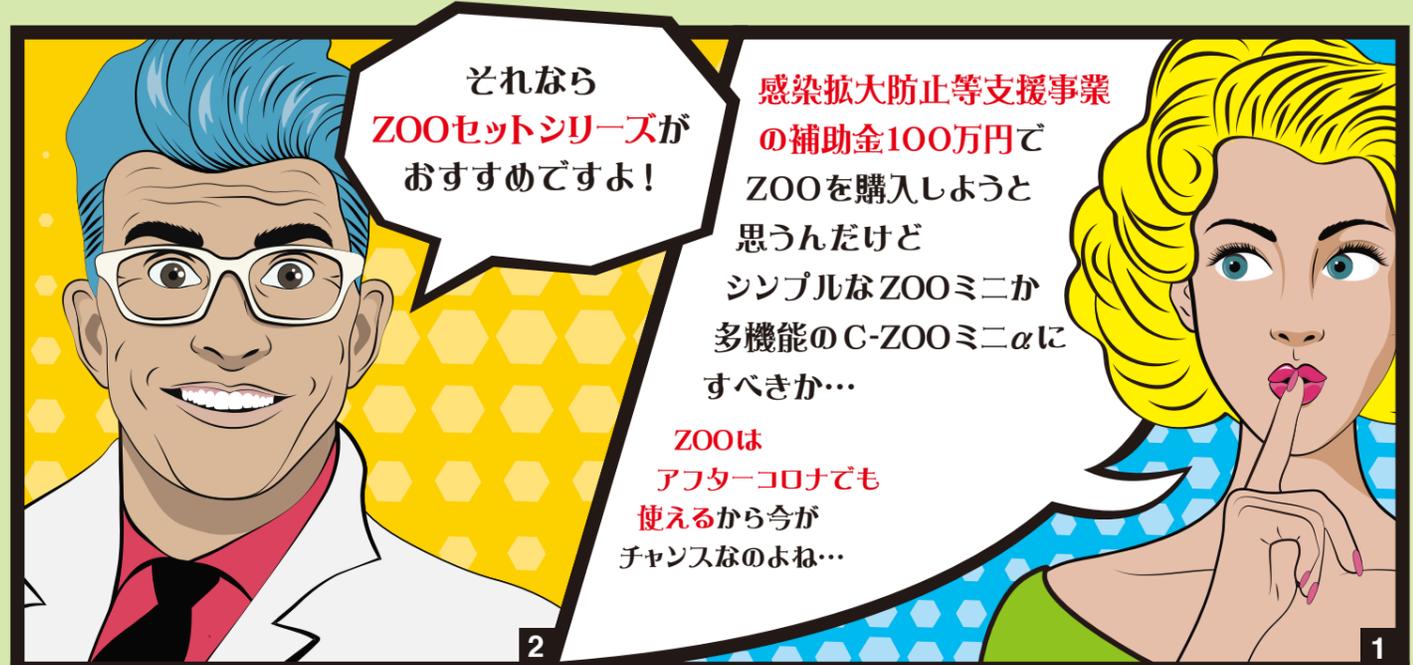

※ZOOは日本の歯科医師一家が開発した防湿装置です。気軽に使えて確実な効果が得られると過去20年間にわたり、累計39,000本以上販売しています。

ZOO

[ズー]




詳しくはこちら

感染拡大防止等支援事業(100万円)の対象に 口腔内バキュームも入りました!

この機会にぜひ!お得な“ZOOセット”ご検討ください!

ZOOミニ Aセット (ズーミニ エーセット)

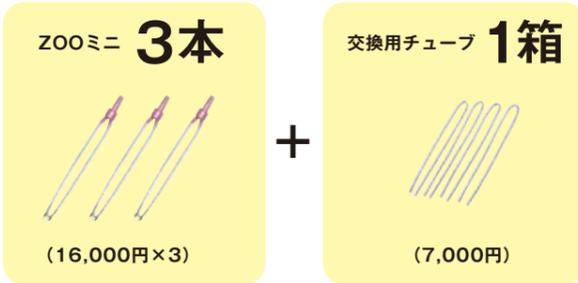


通常販売価格 ~~55,000円(税抜)~~

7,000円
お得!!

セット販売価格
48,000円(税抜)

[ZOOミニAセットは本体3本+交換チューブ1箱セット]

ZOOミニ Bセット (ズーミニ ビーセット)

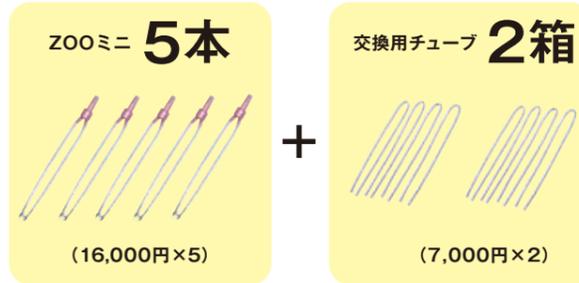


通常販売価格 ~~94,000円(税抜)~~

14,000円
お得!!

セット販売価格
80,000円(税抜)

[ZOOミニBセットは本体5本+交換チューブ2箱セット]

C-ZOOミニα Aセット (シーズーミニアルファ エーセット)

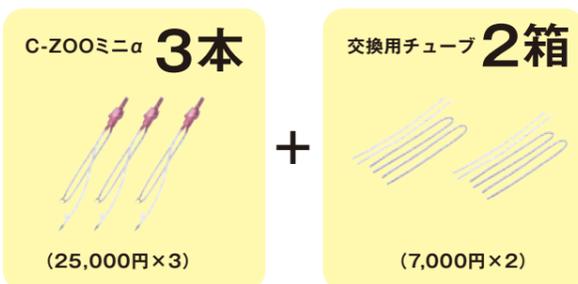


通常販売価格 ~~89,000円(税抜)~~

14,000円
お得!!

セット販売価格
75,000円(税抜)

[c-ZOOミニα Aセットは本体3本+交換チューブ2箱セット]

C-ZOOミニα Bセット (シーズーミニアルファ ビーセット)

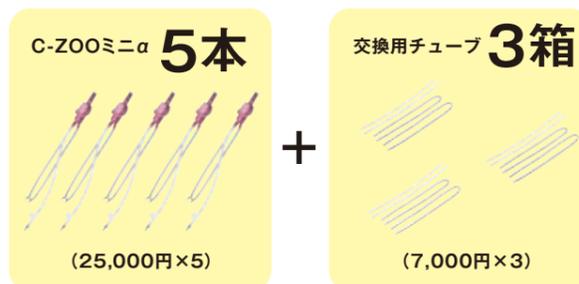

通常販売価格 ~~146,000円(税抜)~~

21,000円
お得!!

セット販売価格
125,000円(税抜)

[c-ZOOミニα Bセットは本体5本+交換チューブ3箱セット]

ご注文時はバキューム直径を11mm・16mm・オサダ専用の中からお選びください(右ページ参照)

※ZOOセット Aセット・Bセットは全てのZOOシリーズに用意しています。

1本からでも購入可能

オートクレーブ滅菌可能!

下顎大臼歯部のレジン充填に最適

舌・唾液が気にならない

パーツはすべて日本製

小児の治療が楽

10秒で装着完了

ZOOミニ ズーミニ

一番シンプルなZOO


16,000円(税抜)



ZOOミニα ズーミニアルファ

ミニバキューム搭載で
根管治療も可能

19,800円(税抜)

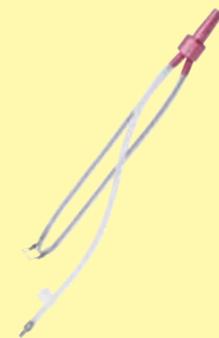

C-ZOOミニα シーズーミニアルファ

ミニバキュームと吸引力の
コントローラーが付き
全ての治療が可能

25,000円(税抜)



装着例

写真のように下顎7番舌側、歯頸部もストレスなく治療可能に!!



装着前



装着後

バネが開口状態を維持し、チューブが舌と頬を排除するので十分な治療スペースを確保するとともに唾液を除去し乾燥状態を保つことが出来ます。

ZOOのバキューム直径をお選びください

注意:コネクターは下記の3種類の中からご使用のチェアーのバキューム直径に合わせてお選びください。

●多くの国産チェアー

「ZOOミニ11ミリ」とご注文下さい



モリタのバキュームには「ZOOミニ11ミリ」をご使用ください

モリタバキュームは直径10ミリとなっています。11ミリでも十分ご使用いただけますが、それでも外れやすい場合は「モリタ専用アダプター」をご併用ください。

モリタ用アダプター
4500円(税別)

※オートクレーブ可能



●シロナ・カボ・ヨシダなどのチェアー

「ZOOミニ16ミリ」とご注文下さい



●オサダ専用

「ZOOミニ11ミリショートオサダ専用」とご注文下さい



使用方法を詳しく説明した動画などを公開しています。詳しくはHPをご覧ください

ZOO歯科

検索

<https://www.apr-inc.jp/zoo/>